



MODALITA' D' INVIO DELLA BIOPSIA MUSCOLARE

IRCCS ISNB
Mod.02.P.8.5 LabNM2



L'invio della biopsia muscolare deve essere preceduto da un preavviso telefonico di almeno 24 ore

La processazione del campione può essere fatta solo da personale esperto la cui presenza in laboratorio deve essere garantita al momento dell' arrivo della biopsia.

Caratteristiche del prelievo bioptico

Le dimensioni del frammento di muscolo ed il numero di frammenti da prelevare dipendono dal tipo di analisi richieste:

- per le analisi istologiche di routine e le analisi in immunofluorescenza è necessario un frammento di muscolo che abbia le seguenti dimensioni minime: lunghezza 0,7mm, larghezza 0,3mm, spessore 0,3mm
- per analisi biochimiche (dosaggio degli enzimi della catena respiratoria mitocondriale effettuate dal Laboratorio di Neurogenetica) è necessario un secondo frammento delle dimensioni sopra indicate

Per maggiori dettagli contattare il personale del laboratorio.

Breve istruzione operativa

Il trasporto della biopsia muscolare dalla sala operatoria al laboratorio **deve essere fatto in ghiaccio** (a cubetti o tritato) per mantenere il tessuto ad una temperatura tra 2 e 8 °C



NON USARE GHIACCIO SECCO!

1. immediatamente dopo il prelievo inserire i frammenti bioptici all'interno di una provetta di plastica contrassegnata con il nome del paziente; chiudere la provetta



(NON avvolgere la biopsia in garze ma lasciarla libera nella provetta)

2. riempire un contenitore (di plastica o di polistirolo) con del ghiaccio ed immergervi la provetta contenente il campione bioptico; sigillare il contenitore.
3. Inviare immediatamente il campione al laboratorio

La biopsia deve essere consegnata al laboratorio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 2 ore dal prelievo



Un ritardo nella processazione del tessuto può produrre artefatti tali da impedire una corretta interpretazione delle analisi.

Nota: i campioni che non saranno trattati secondo le modalità sopra indicate saranno considerati non conformi.



MODALITA' D' INVIO DELLA BIOPSIA MUSCOLARE

IRCCS ISNB
Mod.02.P.8.5 LabNM2

Documenti di accompagnamento alla biopsia cutanea

1. Modulo Richiesta Analisi (Mod.01.P.8.5 LabNM)
2. Consenso al trattamento dei dati genetici e dei campioni biologici
3. Breve relazione clinica
4. Autorizzazione della Direzione Sanitaria (*per i pazienti in regime di ricovero nelle Unità Operative esterne all'AUSL di Bologna*)

La modulistica aggiornata è reperibile alla pagina web del laboratorio, all'indirizzo <https://www.ausl.bologna.it/istituto-delle-scienze-neurologiche/assistenza/laboratori/laboratorio-di-patologia-neuromuscolare>

IMPORTANTE: i campioni che non saranno accompagnati dalla documentazione sopra indicata, o con documentazione incompleta, saranno considerati **NON CONFORMI**

ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI: dal lunedì al venerdì, ore 9:00 – 16:00

Indirizzo a cui spedire/consegnare la biopsia muscolare:

Laboratorio di Patologia Neuromuscolare e Neuroimmunologia
Attenzione Dott. Alex Incensi
IRCCS, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Ospedale Bellaria, Padiglione G, 1° piano
Via Altura 1/8, 40139 Bologna

MODALITA' DI REFERTAZIONE

I referti verranno inviati a mezzo posta (interna per i presidi ospedalieri AUSLBO) o PEC all'indirizzo specificato nel Mod.01.P.8.5 LabNM.

CONTATTI

Dott.ssa Valentino Maria Lucia tel.051- 4966114 e-mail: marialucia.valentino@unibo.it
Dott. Incensi Alex tel.051- 4966743 / 4966744 e-mail: alex.incensi@ausl.bologna.it
Dott. Bari Riccardo e-mail: riccardo.bari@ausl.bologna.it